



**JOBST®, uw partner
in compressietherapie**



Wist je dat:

In de horizontale positie is de druk ter hoogte van onze enkel ongeveer even hoog als de druk in het rechter gedeelte van ons hart.

In de verticale positie neemt de intraveneuze druk toe, deze wordt bepaald door het verticale hoogteverschil tussen enkel en hart.

Wist je dat:

Compressietherapie kan op verschillende manieren worden toegepast.

Met therapeutische elastische kousen
Met aanpasbare klittebandsystemen
Met verbanden

- Elastische verbanden (korte rek en lange rek zwachtels)
- Niet-elastische verbanden (gipsverband, zinklijmverband, of ACD - adjustable compression devices)

Wist je dat:

Het gebruik van compressietherapie beperkt zich niet tot het behandelen van oedeem of van een wonde. Compressietherapie kan ook preventief worden gebruikt. Het effectief toepassen van compressietherapie gaat samen met een goed begrip van het werkingsmechanisme.

Wat is compressietherapie?

1. Compressietherapie

Compressietherapie, of drukbehandeling, is een techniek die we aanwenden om zowel de veneuze als de lymfatische circulatie te verbeteren.

Bij deze therapie werken we enerzijds comprimerend met zwachtels of kousen en anderzijds maken we gebruik van de spierpomp om ons doel te bereiken.

2. Doel

- Gedilateerde venen comprimeren
- Diameter van venen en lymfevaten verkleinen
- Stroomsnelheid van het veneuze bloed verhogen
- Kans op flebitis/trombose verminderen
- Perifeer bloedvolume doen dalen
- Spierpomp ondersteunen
- Oedeem behandelen

3. Indicaties

- Varices
- Ulcus cruris venosum
- Oppervlakkige en diepe veneuze trombose
- Lymfoedeem
- Posttraumatisch oedeem
- Ulcera (traumatisch, diabetisch, ...)
- Erysipelas
- Zwangerschapsvarices
- Staande beroepen
- ...

1. Korte rek

Hoge werkdruk, lage rustdruk

- Aangewezen voor gebruik bij patiënten die **mobiel** zijn. De patiënt is zelf in staat om te bewegen. Beperkt stappen is reeds voldoende.
- Korte rek is **weinig elastisch**. Door de weinig elastische vezels in het verband hebben we een hoge werkdruk. De weinig elastische verbanden geven een hoge weerstand wanneer de kuitspier wordt gebruikt en bijgevolg uitzet.
- Door de niet-elastische vezels hebben we een lage rustdruk.
- De korte rek zwachtels worden best doorlopend gedragen, zowel overdag als 's nachts.
- Bij korte rek hebben we minstens twee zwachtels nodig.

JOBST® Comprilan / Compridur / Compri2*

Korte rek compressiezwachtels



(*) Bestaan in verschillende afmetingen

JOBST®

Korte rek compressiekousen



Compressiekousen bestaan in verschillende drukklassen
JOBST Basic, Relief, UlzerCare



U kan meer info betreffende deze producten terugvinden in onze productfolders.

2. Lange rek

Lage werkdruk, hoge rustdruk

- Aangewezen voor gebruik bij patiënten die **volledig immobiel** zijn. De patiënt is zelf niet in staat om zich te verplaatsen (bedlegerige patiënten).
- Lange rek oefent een voortdurende druk uit.
- Door de **elastische vezels** in het verband hebben we slechts een lage werkdruk.
- De elastische vezels willen steeds naar hun oorspronkelijke vorm terug waardoor we een hoge rustdruk krijgen.
- De lange rek zwachtels dienen 's avonds voor het slapengaan te worden verwijderd.
- Bij lange rek volstaat slechts één zwachtel.

JOBST® Eloflex*

Lange rek compressiezwachtels



(*) Bestaat in verschillende afmetingen

JOBST® Comprinet pro

Lange rek compressiekous



Een lange rek anti-embolie kous
Veel gebruikt na operaties



U kan meer info betreffende deze producten terugvinden in onze productfolders.

3. Compressiestamboom



Dit diagram is een vereenvoudigde weergave en houdt geen rekening met de anamnese en contra-indicaties van de patiënt. Volg steeds het advies van de arts over het te gebruiken compressieproduct.

* Bij een bestaand veneus probleem, raden we aan dat het dragen van compressieproducten voor de aanpak van dit veneus probleem prioriteit heeft op het dragen van anti-emboliekousen.



Bij vermoeden van arterieel lijden steeds doorverwijzen naar een arts alvorens compressietherapie te starten.

Wat biedt JOBST® u als partner in compressietherapie?

In deze brochure kunt u lezen dat compressietherapie zich niet enkel beperkt tot de zwachtels enerzijds en de kousen anderzijds.

JOBST kan u helpen om het gepaste compressieproduct te kiezen. Dit kan dankzij onze uitgebreide productportfolio en gespecialiseerde medewerkers. Het maken van de juiste keuze is bij compressietherapie van groot belang. Naast de kwalitatieve compressieproducten van JOBST heeft u via ons moederbedrijf Essity ook toegang tot de eersteklas wondzorgproducten van Cutimed en Leukoplast, en polstermaterialen van Delta-Cast. Dankzij dit ruime productgamma staat Essity tevens garant voor een uitstekende service.

Wij ondersteunen u graag met de organisatie van workshops en productpresentaties om ons uitgebreide compressieportfolio goed in te zetten en optimale zorg te kunnen bieden aan uw compressiepatiënten.

JOBST staat voor u klaar!



Het compressieteam

Annelies Lauwers

+32 498 64 69 95


annelies.lauwers@essity.com

Marc Theunissen

+32 496 12 03 07

marc.theunissen@essity.com

COMPRESSION_Uw partner in compressietherapie
Essity Belgium SA-NV
Uw partner in compressietherapie_NL
VERPAKKINGSHOEVEELHEID: 10

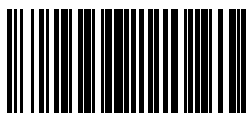

12/2022

Essity Belgium SA-NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b bus 3
1831 Diegem

Tel +32(0)2 766 05 05
Fax +32(0)800 15 934
www.jobst.be