


Curapor® Transparent

Pansement chirurgical, stérile.



Curapor® Transparent

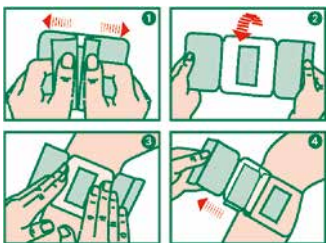

Facile à appliquer.

- A** Positionner simplement le papier de recouvrement et le détacher ...
- B** Retourner le produit ...
- C** Positionner doucement sur la peau nettoyée ...
- D** Retirer le film de protection. Terminé !

Indications

- pour le traitement stérile des plaies post-opératoires, des blessures ainsi que des petites coupures et écorchures
- pour la chirurgie mini-invasive
- pour protéger contre les infections secondaires
- pour couvrir les plaies sous la douche ou dans la piscine

Propriétés

- prêt à l'emploi
- transparent et étanche à l'eau
- respirant
- perméable aux bactéries
- résiste aux agents désinfectants courants
- adhère bien et précisément
- se retire sans laisser de résidus et de manière indolore
- risque faible de coller à la plaie
- convient également bien aux peaux sensibles

Composition du produit

Film protecteur : 100 % polyuréthane, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau (sans colophane et dérivé de colophane)
Comresse : couche absorbante en viscose/polyester, couche au contact de la plaie en polyester et polyéthylène.

Remarques

- les pansements de dimensions 7x5 cm et 10x8 cm ont des angles arrondis

Curapor® Transparent

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	Comresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
7 x 5	4 x 2.5	13099	2173003	5/120
10 x 8	6 x 4	13100	2172989	5/170
7 x 5	4 x 2.5	13101	2172997	50/500
10 x 8	6 x 4	13102	2172971	25/200
15 x 10	11 x 5	13103	2172963	25/225
20 x 10	16 x 5	13104	2172955	25/225
25 x 10	20 x 5	13105	2172948	25/225