

Debrisoft® Duo Pad



Debrisoft® Duo Pad

Indications

- plaies aiguës et chroniques, ainsi que la peau entourant la plaie :
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ ulcères artériels et veineux
 - ◆ ulcères de pression
 - ◆ plaies postopératoires cicatrisant par intention secondaire
 - ◆ plaies traumatiques et chirurgicales (abrasions, incisions, lacerations)
 - ◆ brûlures et échaudures (3e degré : après débridement chirurgical)
 - ◆ épidermolyse bulleuse
- convient aux peaux sèches, parcheminées, grasses, séborrhéiques ou saines et aux peaux hyperkératosiques telles qu'elles peuvent se présenter, par exemple, en association avec un lymphoedème.

Propriétés

- compresse de débridement 2 en 1 efficace.
- développé pour permettre un débridement des tissus fibreux très adhérents plus efficace que le débridement mécanique standard.
- le nouveau côté beige texturé permet de détacher facilement les mucosités fibreuses très adhérentes (d'après des données in vitro).
- le côté blanc doux original enlève les débris cellulaires, l'exsudat et le biofilm de la plaie.

Composition du produit

Polyester, polyacrylate, copolymère styrène-butadiène, éthylène-acétate de vinyle, carboxyméthylcellulose, polyamide

Remarques

- produit pour le débridement, ne reste pas sur la plaie
- peut être utilisé à chaque changement de pansement si nécessaire
- Debrisoft Duo ne doit pas être coupé sur mesure

Conseil

- avant d'utiliser Debrisoft Duo, retirez toute lotion, gel, crème ou pommade, car ils peuvent compromettre les performances du produit.
- veillez à ne pas irriter excessivement la plaie ou la peau et, si nécessaire, réduisez la pression ou utilisez l'autre face du produit.
- Debrisoft Duo donne également de très bons résultats sur les surfaces gravement kératosiques ou nécrotiques lorsqu'elles ont été préalablement traitées par débridement autolytique.
- le côté doux blanc peut être humidifié avec n'importe quelle solution standard d'irrigation des plaies, conformément aux directives nationales.

Debrisoft® Duo Pad

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 10	159990	4820601	5/50
13 x 20	159991	4820593	5/50