

Debrisoft® Duo Pad



Debrisoft® Duo Pad

Toepassingsgebieden

- acute en chronische wonden en ook voor de huid rondom de wond:
 - ◆ diabetische ulcers
 - ◆ arteriële en veneuze ulcers
 - ◆ decubituswonden
 - ◆ postoperatief secundair genezende wonden
 - ◆ traumatische en chirurgische wonden (schaafwonden, incisies, rijtwonden)
 - ◆ brandwonden en verbrandingen (3^e graad: na chirurgisch débridement)
 - ◆ bultvormige epidermolysis
- geschikt voor droge, perkamentachtige, vette, seborroïsche of gezonde huid en hyperkeratotische huid zoals die bijvoorbeeld kan voorkomen bij lymfoedeem.

Eigenschappen

- efficiënte 2-in-1 débridementpad.
- ontwikkeld voor débridement van stevig vastzittende, fibrineuze weefselresten dat effectiever is dan standaard mechanisch débridement.
- de nieuwe ruwe beige zijde maakt stevig vastzittende, fibrineuze weefselresten eenvoudig los).
- de originele zachte, witte zijde verwijdert celdébris, exsudaat en biofilm van de wond.

Productsamenstelling

Polyester, polyacrylaat, styreen-butadieëncopolymeer, ethyleen-vinylacetaat, carboxymethylcellulose, polyamide.

Opmerkingen

- product voor débridement, blijft niet achter op de wond
- kan naar wens bij elke verbandwisseling worden gebruikt
- Debrisoft Duo hoeft niet op maat geknipt te worden

Tip

- verwijder lotions, gels, crèmes of zalven voordat u Debrisoft Duo gebruikt, omdat deze de werking van het product negatief kunnen beïnvloeden.
- zorg ervoor dat u de wond of huid niet overmatig irriteert en verminder indien nodig de druk of gebruik de andere kant van het product.
- Debrisoft Duo behaalt ook zeer goede resultaten op ernstig keratotische of necrotische oppervlakken wanneer deze eerder zijn behandeld met autolytisch débridement.
- de zachte vezelzijde kan worden bevochtigd met elke standaard wondspoeloplossing in overeenstemming met de nationale richtlijnen.

Debrisoft® Duo Pad

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 10	159990	4820601	5/50
13 x 20	159991	4820593	5/50