

Debrisoft® Lolly

De gouden standaard bij mechanisch débridement.



Debrisoft® Lolly



- A** Reinig de wond en/ of moeilijk te bereiken wondlocaties onder zachte druk met de zachte vezelkop van de bevochtigde Debrisoft Lolly.
- B** De vezelverbinding neemt het losgemaakte necrotische en keratosemateriaal op en houdt het vast.

Toepassingsgebieden

- Débridement van diepe – ook chirurgisch-invasieve – tot oppervlakkige wonden zoals:
 - ◆ diabetische ulcers
 - ◆ arteriële en veneuze ulcers
 - ◆ decubituswonden
 - ◆ postoperatief secundair genezende wonden
 - ◆ traumata en brandwonden

Eigenschappen

- gepatenteerde hightech polyestervezels verwijderen effectief débris en exsudaat uit de wond, en huidschilfers en keratose van de huid rondom de wond
- de breukvaste steel van polypropyleen biedt eenvoudige toegang tot diepe wonden - ook chirurgisch-invasieve wonden - en moeilijk te bereiken wondlocaties
- het zachte vezelverband zorgt voor een nagenoeg pijnloos gebruik en biedt tegelijkertijd een hoog gebruikscomfort
- de hoogste gebruiksveiligheid wordt gegarandeerd door nauwkeurig aangebrachte fixatienaden, een ergonomische steel en traceerbare röntgencontrastdraden
- de stick met monofilamentvezels is eenvoudig te hanteren en daardoor een innovatief hulpmiddel voor uw débridement

Productsamenstelling

Zachte kop: bestaat uit monofilament-polyestervezel en is omnaaid met een blauwe röntgencontrastdraad van polypropyleen (bevat bariumsulfaat en polyester).
Binnenkant van de kop: gecoat met polyacrylaat.
Steel: polypropyleen.

Opmerkingen

- product voor débridement, blijft niet achter op de wond
- kan naar wens bij elke verbandwisseling worden gebruikt
- mag zo lang worden gebruikt tot de wond geheel gereinigd is en van de reinigingsfase naar de granulatiefase is overgegaan

Tip

- leidt ook bij sterk keratotische, necrotisch beleg tot een bijzonder goed resultaat als deze eerst autolytisch behandeld is
- de zachte vezelkant kan met elke gangbare wondspoeloplossing worden bevochtigd

Debrisoft® Lolly

steriel, afzonderlijk verpakt

REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
33224	3314879	5/50