



Debrisoft® Lolly



- A** Nettoyer la plaie et/ou les régions difficiles d'accès avec la tête en fibres douces et humidifiées, en exerçant une légère pression.
- B** Le composite en fibres absorbe les débris et kératoses dissous et les retient.

Indications

- débridement des plaies superficielles à profondes (résultant également de chirurgies invasives), par ex. :
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ ulcères artériels et veineux
 - ◆ escarres de décubitus
 - ◆ plaies postopératoires en cours de cicatrisation secondaire
 - ◆ traumatismes, brûlures

Propriétés

- les fibres en polyester high-tech brevetées éliminent efficacement les débris et l'exsudat provenant de la plaie, ainsi que les plaques de desquamation et les kératoses de la peau périlésionnelle
- la poignée résistante en polypropylène offre un accès simplifié aux plaies profondes, y compris celles résultant de chirurgies invasives et difficiles d'accès
- le faisceau de fibres doux garantit une utilisation quasiment indolore tout en assurant un confort d'utilisation élevé
- une sécurité d'utilisation optimale est garantie grâce à des coutures de fixation précises, une poignée ergonomique et un fil de contraste traçable
- le bâtonnet doté de fibres monofilament convainc par sa manipulation simple et constitue ainsi une aide innovante pour votre débridement

Composition du produit

La tête douce : en fibres de polyester mono-filament et bordée d'un fil radiodétectable bleu en polypropylène (comportant du sulfate de baryum et du polyester).
Intérieur de la tête : couvert de polyacrylate.
Poignée : polypropylène.

Remarques

- produit de débridement, n'adhère pas à la plaie
- peut être utilisé en fonction des besoins lors de chaque changement de pansement
- devrait être utilisé jusqu'à ce que la plaie soit totalement nettoyée et ait terminé la phase d'assainissement pour entamer la phase de granulation

Conseils

- engendre un très bon résultat même en cas de fortes kératoses et nécroses lorsque ces dernières sont traitées dans un premier temps de manière autolytique
- l'humidification du côté doux des fibres peut se faire avec n'importe quelle solution de rinçage des plaies courante

Debrisoft® Lolly

stérile, scellé en emballage individuel

REF	CNK	Conditionnement (pièces)
33224	3314879	5/50