

DISPOJECT® NOUVEAU SERINGUES À INSULINE STANDARD

Seringue 3 pièces 40 UI de 1ml avec aiguille extra-fine surmoulée de 29G.

- Stérile, usage unique, sans latex.
- Aiguille avec un bouchon de protection.

Livré par boîte de 100.



Code	Capacité	Graduation	Cond.	S/Cond.
107135	1 mL	1 UI	X 100	x 36

DISPOJECT® NOUVEAU SERINGUE À INSULINE SÉCURISÉE

Seringue 3 pièces 40 UI de 1ml avec aiguille extra-fine surmoulée de 29G.

- Stérile, usage unique, sans latex.
- Avec un système unique et innovant de protection permettant de bloquer l'aiguille une fois la seringue utilisée afin de ne pas se piquer. Apporte sécurité et confort à l'utilisateur.

Livré par boîte de 100.

Retrouvez la version vidéo
sur notre chaîne Youtube !



 **VERROUILLEZ,
VOUS ÊTES SÉCURISÉ !**



verrouillage de protection



Code	Capacité	Graduation	Cond.	S/Cond.
107136	1 mL	1 UI	X 100	x 20

COMMENT SÉCURISER LA SERINGUE?

Pour verrouiller votre seringue, tirez sur la capsule, **A** puis tournez-la jusqu'à la bloquer. **B**

Il est impossible de rétracter la capsule après l'avoir tournée.

Pour éliminer l'aiguille séparément de la seringue, cassez la capsule. **C**

