

NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing

Melladerm® PLUS is een medisch hulpmiddel

Presentatie: 20 – 50 gram tubes

Product omschrijving

Melladerm® Plus is een gel die bestaat uit: honing, glycerine, propyleen glycol, PEG 4000. Wanneer de zalf in contact komt met de wonde zal er wondvocht onttrokken worden aan de omliggende weefsels. Door deze osmotische activiteit wordt er een vochtig wondhelingsklimaat gecreëerd. Een vochtig klimaat samen met de honing zorgt voor een ontstekingsremmende werking, afname van zwelling en pijn, reinigt de wond en zorgt voor een voorspoedige wondgenezing. De gel zal geleidelijk verdunnen en kan gemakkelijk verwijderd worden.

Melladerm® Plus is een primair wondverband dat afgedekt kan worden met de meeste afdekkende wondverbanden.

Volledige kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling

Melladerm® Plus bestaat uit 45% honing. De samenstelling hieronder kan wat afwijken omdat honing een natuurproduct is.

Nr.	component	%	min - max
1	Water	7,7	6,7 - 9
2	Fructose	17,5	12,5 - 18
3	Glucose	14	8,5 - 14,5
4	Maltose	3	2 - 4
5	Sacharose	1,8	0,05 – 2
6	PEG4000	16	0
7	Propyleenglycol	34,5	0
8	Glycerol	4,50	0

Indicaties en beoogd gebruik

Oppervlakkige Chronische wonden - Decubitus, Ulcus Cruris, diabetische voetwonden, wonden met schimmel (geurverdrijvend en debriderend).

Verontreinigde acute wonden – chirurgische wonden (postoperatieve wonden), traumatische wonden (oppervlakkige wonden, snijwonden), kleine brandwonden en laserwonden (1° en 2° graad).

Melladerm® Plus kan zowel door gespecialiseerde zorgverleners als door leken worden gebruikt.

Contra-indicaties

- Er zijn tot op heden geen contra-indicaties gekend.
- Patiënten met een sterk verhoogd risico op infecties zoals zeer uitgebreide brandwonden.
- Patiënten die bekend zijn met een overgevoeligheid voor Melladerm® Plus of de componenten hiervan.
- Niet op ogen en of slijmvliezen gebruiken.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.

Bijwerkingen

- Melladerm® Plus kan in sommige gevallen een kortdurende prikkeling veroorzaken.
- Indien zich een ernstig incident heeft voorgedaan met betrekking tot het medisch hulpmiddel (Melladerm® Plus), dient de patiënt/gebruiker dit te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Voorzorgsmaatregelen

- Raadpleeg indien nodig een zorgverlener voor de juiste medische behandeling.
- Inspecteer en reinig de wond met een wondreiniger.
- Bacteriële kolonisatie van chronische wonden is altijd aanwezig en is geen contra-indicatie voor het gebruik van Melladerm® Plus.
- Door het autolytisch debridement kan de wonde dieper lijken na de eerste verbandwisselingen.
- Roep medische hulp in als er tekenen van infectie optreden.
- Melladerm® Plus is om kruisbesmetting te voorkomen uitsluitend bestemd voor gebruik bij één patiënt,
- Wanneer de conditie van de wonde verslechtert, moet de behandeling met Melladerm® Plus worden stopgezet.
- Gebruik het product niet langer dan 30 dagen na een.

Zwangerschap, borstvoeding en gebruik bij pediatrische patiënten (0-15 jaar)

Er is geen informatie bekend over het gebruik van Melladerm® Plus tijdens zwangerschap of borstvoeding. Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Er zijn tot op heden geen contra-indicaties gekend voor het gebruik van Melladerm® Plus bij pediatrische patiënten.

Aanbrengen

1. Reinig de wonde.
2. Verwijder het deksel en open de tube op een aseptische manier.
3. Knijp in de tube om de gel eruit te halen en breng het aan zonder de wonde aan te raken.
4. Gebruik indien nodig een (steriele) spatel.
5. Leg een verband op de gel om de wond te bedekken.
6. Melladerm® Plus kan gemiddeld tot 48 uur op de wond blijven zitten. Breng de gel opnieuw aan op de wonde van zodra de gel is verdwenen.

Verwijderen/ verbandwissel

Melladerm® Plus dient verwisseld te worden als lekkage van het afdekkend verband optreedt of wanneer het afdekkend verband wordt verwijderd. De zalf kan worden uitgespoeld met een steriele zoutoplossing. Een verbandwissel is afhankelijk van de exsudaat productie van de wonde, maar is gemiddeld om de 2 tot 7 dagen.

Afval verwerking/ verwijdering

Kartonnen doos, papieren bijsluiter bij papierafval en de plastic tube bij recycleerbaar afval.

Bewaar instructies

Bewaren tussen 5°C en 25°C

Na het openen van de verpakking is het product nog 28 dagen te gebruiken.