

HydroClean® advance

Hydroactief wondverband

HydroClean® advance reinigt de wonde doeltreffend en activeert het genezingsproces.

De wondcontactlaag bestaat uit een polypropyleen tricot waarop silicone strips werden aangebracht. De wondcontactlaag en de silicone strips voorkomen verkleving met het wondbed. Aan de zijde die niet op de wond wordt gelegd voorkomt een waterdichte polypropyleenfolie, bedekt met een hydrofoob polypropyleen non-woven de vroegtijdige uitdroging van wondverband. Hierdoor kan er gedurende drie dagen vocht aan het wondbed worden afgegeven, terwijl de polypropyleen folie voorkomt dat de buitenzijde van het wondverband doornat wordt. Door de bijzondere eigenschappen en werking geeft HydroClean® advance drie dagen Ringer-oplossing aan de wonde af. Gedurende deze periode wordt hier een interactieve en continue wondspoeling geactiveerd terwijl het wondverband gelijktijdig het wondexsudaat absorbeert. Het SAP van HydroClean® advance inactieveert de matrixmetalloproteases (MMP) die het genezingsproces verstoren. Zo kan een stagnerend genezingsproces bij chronische wonden opnieuw worden geactiveerd.

Eigenschappen

HydroClean® advance is een hydroactief wondverband met als centraal bestanddeel een super absorberend polyacrylaat (SAP) dat door cellulose- en celstofvezels omringd is en geactiveerd (vooraf bevochtigd) wordt met Ringer oplossing.

Materiaal

Omhulsel: interlocktricot uit polypropyleen vezels (met groene strepen op de zijde die niet op de wond wordt gelegd).

Beschermfolie: waterdichte polypropyleen folie

Absorptiekern: Air laid uit superabsorberend polyacrylaat, celstof en polypropyleen vezels, geactiveerd met Ringer-oplossing – United States Pharmacopoeia

Indicatie en aanbrenging

Voor de natte/vochtige behandeling van alle wonden en in het bijzonder deze met een slechte genezingstendens. HydroClean® advance is vooral geïndiceerd bij de behandeling van chronische en slecht genezende wonden in de reinigings- en granulatiefase. Daarenboven kan HydroClean® advance voor het opnieuw activeren van een stagnerend genezingsproces worden toegepast, indien dit door een te hoge MMP activiteit wordt veroorzaakt.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijs-eenheid	Verzend-eenheid	CNK
HydroClean® advance PHMB, Steriel	Diameter 4 cm	609 762	10 stuks	6 x 10 stuks	3700028
	Diameter 5,5 cm	609 766	10 stuks	6 x 10 stuks	3700036
	Ovaal 8 X 4 cm	609 764	10 stuks	6 x 10 stuks	3700044
	7,5 X 7,5 cm	609 768	10 stuks	6 x 10 stuks	3699899
	10 X 10 cm	609 772	10 stuks	6 x 10 stuks	3700051

Voordelen:

- Actieve, snelle en efficiënte wondreiniging
- Bindt de bacteriën in het verband
- De-activering van factoren die de wondheling remmen (protease)
- Bevordert de granulatie
- Minder pijn bij de verbandwissel
- werkt tot 3 dagen
- Geen gekende tegenindicaties en dus bruikbaar voor alle wonden