

Lomatuell® Pro

Gelvormend contactnetwerk.



Lomatuell® Pro

Toepassingsgebieden

- kan worden gebruikt tijdens alle fasen van exudatiefasen
- chronische wonden
 - ◆ ulcus cruris
 - ◆ diabetische voetulcers
 - ◆ decubitus
- acute wonden
 - ◆ scheur-, snij- en schaafwonden
 - ◆ tweedegraads verbrandingen
- postchirurgische wonden
 - ◆ secundair genezende operatiewonden
 - ◆ split-skin-afnameplekken
- met onderdruktherapie als wondafstandsgaas te combineren*

Eigenschappen

- opbouw van een laagje gel van vaseline en hydrocolloïddeeltjes
- atraumatische verbandwissel
- eenvoudige toepassing
- aan beide zijden te gebruiken
- kan op maat worden geknipt voor diverse wondafmetingen en lichaamsgebieden
- ondersteuning van de wondgenezing
- het risico van aan de wond kleven, wordt geminimaliseerd
- flexibel, soepel materiaal
- goede afvloeiing van exsudaat in het secundaire verband
- vrijwel pijnloze verbandwisseling

Productsamenstelling

Polyestervezel-netstructuur geïmpregneerd met een coatings-massa bestaande uit polymatrix (een elastische, vevormbare fixatiemassa), vaseline en hydrocolloïd.

Opmerkingen

- het aanbevolen interval tussen verbandwisselingen bedraagt over het algemeen 2-4 dagen. Afhankelijk van het type wond en het verloop van de wondgenezing kan het verband langer (maximaal 7 dagen) of korter op de wond blijven

Lomatuell® PRO

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 5	30870	3048758	10/360
10 x 10	30871	3048766	10/120
10 x 20	30872	3048774	10/120
10 x 30	30873	3048782	10/80
10 x 10	30874	3210309	50/450
10 x 40	220000	4135273	10/120
15 x 20	220001	4135281	10/50
15 x 30	220002	4135299	5/55

* gebaseerd op in-vitro-onderzoeken