

Sorbalgon® (T)

Wondbedekker met calciumalginaatvezels

Sorbalgon® is een calciumalginaatverband met een hoog absorberend vermogen. Zodra Sorbalgon® in contact komt met de zouten in exsudaat en bloed, vormt zich een gel die helpt de wond te beschermen en het overtollige exsudaat en bacteriën opsluit.

De gel heeft een hydraterende werking en creëert zo een milieu dat bevorderend is voor de genezing. Effectief exsudaatbeheer is van groot belang, omdat exsudaat niet alleen de huid rondom de wond kan beschadigen, maar ook het genezingsproces belemmert als deze fase te lang duurt.

Eigenschappen

Sorbalgon® heeft een zeer hoge absorptiecapaciteit en kan ongeveer 20 keer het eigen gewicht opnemen. Wanneer Sorbalgon® in contact komt met de zouten in wondexsudaat en bloed, vormt het een gel. De gel sluit bacteriën op en voorkomt zo dat ze de wond aanvallen, waardoor een beter genezingsmilieu wordt gecreëerd. De gel voorkomt ook dat het product zich vasthecht aan de wond. Indien bij het verwijderen een restant van de wondbedekker achterblijft, wordt dit door het lichaam geresorbeerd.

De gelachtige consistentie van Sorbalgon® heeft hetzelfde effect als een vochtig verband en voorkomt dat de wond uitdroogt. Het vochtig houden van de wond bevordert het genezingsproces. Sorbalgon® is verkrijgbaar als rechthoekig kompres in verschillende formaten. Voor diepe wonden is Sorbalgon® ook verkrijgbaar als tamponadestrook, herkenbaar aan de T achter de naam.

Materiaal

99% calciumalginaat en 1% polysorbaat. Sorbalgon® bevat geen werkzame bestanddelen. Het product is als medisch hulpmiddel klasse IIb ingedeeld.

Indicatie en aanbrenging

Voor alle wonden met secreetvorming, zowel acute als chronische. Bijvoorbeeld graftlocaties, neusbloedingen, nageextracties, abscessen, beenulcera of decubitus, maar ook wonden na een (tumor)chirurgische ingreep. Contra-indicaties: niet bekend.

Wanneer Sorbalgon® wordt gebruikt voor diepe wonden, moet de wondholte losjes worden opgevuld, omdat de alginaatvezels uitzetten als ze wondexsudaat opnemen. Een te stevig opgevulde wondholte kan leiden tot pijn en schade, omdat het vulmateriaal tegen de wondranden drukt. Sorbalgon® kan worden gefixeerd met een folieverband, een hydrocolloïd verband of een absorberend verband.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
Sorbalgon® steriel, per stuk verpakt	5 x 5 cm	999 598	10 stuks	20 x 10 stuks	1232958
	10 x 10 cm	999 584	3 stuks	15 x 3 stuks	1527514
	10 x 10 cm	999 595	10 stuks	10 x 10 stuks	1232966
	10 x 20 cm	999 589	5 stuks	8 x 5 stuks	1527522
Sorbalgon® T steriel, per stuk verpakt	2 g / 30 cm	999 592	5 stuks	10 x 5 stuks	1300144

Voordelen:

- Hoog absorptievermogen
- Hemostatisch
- Behoudt een nat milieu
- Heel zacht en conformeerbaar
- Veilige reiniging
- Eenvoudig in gebruik
- Economisch

