


Suprasorb® A + Ag

Pansement antimicrobien à l'alginate de calcium.



Suprasorb® A + Ag

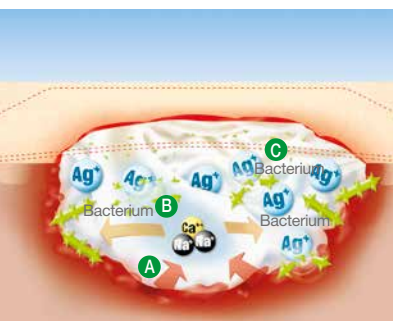

- A** L'exsudat excédentaire sécrété par la plaie est absorbé dans le pansement.
- B** Formation de gel par échange d'ions.
- C** Elimination des bactéries dans le lit de la plaie en libérant des ions d'argent.

Indications

- pour le traitement des plaies à risque d'infection ou infectées, fortement exsudatives, superficielles ou profondes.
- indications :
 - ◆ escarres
 - ◆ ulcères artériels
 - ◆ ulcères veineux
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ plaies chirurgicales
 - ◆ sites donneurs de greffes

Utilisation prévue

Les compresses et les mèches peuvent être utilisées pour le traitement de plaies infectées et présentant un risque d'infection.

Propriétés

- efficacité antimicrobienne élevée, également contre les SARM et les ERV*
- favorise la cicatrisation grâce à la grande capacité d'absorption de l'exsudat
- souplesse, quel que soit le lit de la plaie
- forme un gel qui crée un milieu humide autour de la plaie et contribue à la réduction de la charge en germes

Composition du produit

Fibre d'alginate de calcium, fibre d'alginate d'argent (1,5% d'argent ionique).

Remarques

- intervalle entre chaque changement de pansement :
 - ◆ c'est au médecin traitant de déterminer la fréquence à laquelle Suprasorb A + Ag doit être changé. Selon le degré d'exsudation, le pansement peut rester en place jusqu'à 7 jours sur/dans la plaie
- en cas d'infections :
 - ◆ utiliser un pansement secondaire occlusif uniquement sur décision du médecin, en fonction de la situation générale

Modèles

- compresse
- mèche

Suprasorb® A + Ag

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	Poids (g)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
compresse				
5 x 5		20570 / 149265	2355279	10/100
10 x 10		20571 / 149266	2355261	10/50
10 x 20		20572 / 149267	2355253	5/20
mèche				
30	2	20573 / 149268	2355246	5/20

* Spectre d'agents pathogènes démontré in vitro, voir mode d'emploi